

BTM CLIP CLASSIC

El sistema de control de la continencia está diseñado para tratar la incontinencia urinaria masculina, sin cirugía o drogas en pacientes post operados o portadores de trastornos vesicales o del esfínter urinario.

El BTM CLIP CLASSIC, previene el escape de orina mediante la aplicación, de una leve presión alrededor del pene. Este dispositivo es colocado alrededor del pene para bloquear la pérdida de orina a través de la uretra.

Para orinar usando el BTM CLIP CLASSIC, los hombres liberan la presión alrededor del pene, permitiendo el flujo de orina al exterior. Este sistema tiene una probada utilidad para hombres con cirugía prostática, diabetes, obesidad y pérdida del control vesical, debido a la edad.

MANUAL DE INSTRUCCIONES BTM CLIP CLASSIC

1. Traccionar el pene y colocar el BTM CLIP CLASSIC, en la mitad del cuerpo del este.
2. Colocar entre el índice y el pulgar el BTM CLIP CLASSIC, y presionar firmemente, lo cual abrirá ampliamente para hacer ubicado, en la posición adecuada para comprimir la uretra.
3. Colocar el dispositivo cerca de la mitad del cuerpo del pene, para un mejor resultado.
4. Para orinar mientras usa el BTM, presionar el clip, abriendo ampliamente este para descomprimir la uretra. Luego reposicionar el dispositivo, a la posición correcta de compresión uretral

PRECAUCIONES:

Pueden usar BTM CLIP CLASSIC:

1. los pacientes con leve a moderada incontinencia urinaria. Aquellos con más severa incontinencia, podrían usar este dispositivo como ayuda para reducir el uso de otras opciones. (protectores o pañales).
2. No se recomienda el uso por más de 12 horas continuas.
3. Este puede ser reutilizado mientras este en buenas condiciones, sin perder su efectividad. En este caso debe ser cambiado por uno nuevo, en un plazo de 3 a 4 semanas.

4. Para optimizar su efectividad se debe explorar diferentes áreas del pene, hasta obtener el resultado óptimo.
5. Suspender el uso del BTM CLIP CLASSIC, y buscar una evaluación médica, si presenta una irritación severa de la piel, dolor durante la micción de orina o cambios en la coloración del pene.
6. No usar el dispositivo si:
 - 6.1 Usa una sonda urinaria.
 - 6.2 Tiene un implante peniano
 - 6.3 Presenta una infección urinaria
 - 6.4 No tiene habilidad manual para retirar o colocar el dispositivo.
 - 6.5 Presenta una curvatura peniana severa, enfermedad del Peyronie
 - 6.6 Presenta una erección persistente (priapismo)

No usar BTM CLIP CLASSIC, mientras duerme